


סרגל מדידה להתאמת גודל קאפ משאבה

חשוב לוודא שגודל הקאפ מתאים למידותיך, כדי להבטיח שאיבה אפקטיבית

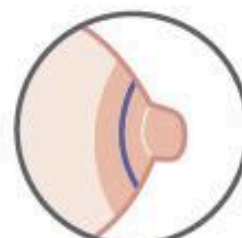


איור א'

- הנחיות למציאת מידת קאפ להתאמה מירבית:**
1. הדפיסי את סרגל המדידה (על דף A4 סטנדרטי)
 2. בחרי את העיגול שנראה לך הכי קרוב למידותיך
 3. גזרי בזהירות את פנים העיגול מתוך הדף שהדפסת
 4. מקמי את העיגול הנבחר מסביב לפטמה

תוכלי לדעת שזו המידה הנכונה עבורך אם:

- הפטמה יושבת בתוך העיגול והדף נייר מגיע ל 6 מ"מ
- מבסיס הפטמה (ראי את הקו הסגול באיור א')
- הפטמה נמצאת במרכז העיגול ונשאר מרווח של 2 מ"מ מכל כיוון

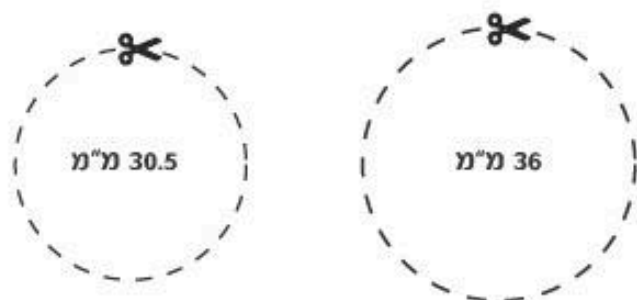

קאפ גדול מדי

במהלך השאיבה האיזור שמסביב לפטמה (העטרה) נשאבת לתוך התעלה. ייתכן שהעטרה נשאבת עם דפנות תעלת הקאפ.



קאפ קטן מדי

במהלך השאיבה הפטמה מתחככת בדפנות של תעלת הקאפ.



התאמה טובה של הקאפ

במהלך השאיבה הפטמה נעה בחופשיות בתעלת הקאפ. יש מרווח מסביב לפטמה. מעט מהאיזור שמסביב לפטמה (העטרה) נשאבת לתוך התעלה.



משאבת החלב הידנית של לנסינו מגיעה עם קאפ במידה 25 מ"מ



משאבת החלב החשמלית החד צדדית הקומפקטית של לנסינו מגיעה עם קאפ במידה 25 מ"מ



משאבת החלב החשמלית הדו צדדית של לנסינו מגיעה עם 2 זוגות של קאפים במידות 25 מ"מ ו-30.5 מ"מ