

Lansinoh®

עלון לצרכן – משאבת חלב ידנית של לנסינו LANSINOH®

חשוב! יש לקרוא היטב את כל ההנחיות למשתמש המופיעות להלן לפני השימוש במוצר זה.

אנו מברכים אותך על שבחרת להעניק לתינוק שלך את ההתחלה הטובה ביותר בחיים באמצעות הנקה. ההנקה מציעה מגוון יתרונות בריאותיים עבורך ועבור תינוקך, כפי שחוכה על ידי מחקרים רבים ושונים. על אף שתמיד מומלץ להניק, קשה לספק לתינוקך חלב-אם שכאת לא נמצאת בקרבך, למשל בעבודה. הדבר דורש מאמץ מיוחד, ועלִיך להיות גאה מאוד במחויבות שלך לספק לתינוקך את התזונה המושלמת להתפתחות אופטימלית. משאבת החלב שלנו מעוצבת באופן המאפשר שימוש מהיר וקל עבור אימהות שצריכות לשאוב ומשמריכות את הנוחות של משאבה ידנית.

תוכן עניינים:

- הכירי את משאבת החלב הידנית של® Lansinoh
- חלקי משאבת החלב הידנית של® Lansinoh
- כיצד לבצע סטריליזציה ולנקות את משאבת החלב הידנית של® Lansinoh
- כיצד להרכיב את משאבת החלב הידנית של® Lansinoh
- כיצד להשתמש במשאבת החלב הידנית של® Lansinoh
- הנחיות לאחסון חלב אם
- טיפים לשאיבה
- פתרון בעיות עבור משאבת החלב הידנית של® Lansinoh
- האכלת חלב אם באמצעות הפטמה הפריסטלטית® NaturalWave

מטרת השימוש של משאבת חלב
משאבת חלב ידנית של לנסינו מיועדת לשאוב ולאסוף חלב אם של אישה מניקה, לצורך הונת חלב אם לתינוק. משאבת חלב אם ידנית של לנסינו מיועדת למשתמשת יחידה.

התוויות נגד לשימוש במשאבת החלב
לא ידוע על התוויות נגד.

1. הכירי את משאבת החלב הידנית של® Lansinoh

משאבת החלב הידנית של® Lansinoh תוכננה במיוחד במחשבה על צורכיהן של אימהות מניקות. למשאבת החלב שני שלבים: שלב גירוי ושלב שאיבה. ניתן לעבור בקלות בין שני השלבים על ידי שינוי מיקום הידית על גבי הדורוך.

מגן השד® ComfortFit יוצר איטום המאפשר שאיבה יציבה המובילה לזרימת חלב נוחה ומורירה. הבקבוק, בעל הצוואר הרחב ניתן להחלפה בין כל סוגי המשאבות של® Lansinoh.

המשאבה קלה להרכבה, קלה לשימוש וקלה לניקוי.

2. חלקי משאבת החלב הידנית של® Lansinoh

מס' החלק	שם החלק	
A	מגן שד ComfortFit®	53408
B	גוף המשאבה הידנית	50631
C	דיאפרגמה מסיליקון	50626
D	זרוע המשאבה הידנית	50627
E	ידית המשאבה הידנית	50621
F	שסתום לבן	53480
G	בקבוק איטוף	53562
H	מכסה בקבוק	53462
I	צווארון בקבוק	53463
J	פטמת NaturalWave®	71027
K	מכסה לאחסון בקבוק	53564

3. כיצד לבצע סטריליזציה ולנקות משאבת החלב של®Lansinoh

לפני השימוש הראשון, פקדי אותה (הסירי את דיאפרגמת הסיליקון, הדורוך, מגן השד® ComfortFit והשסתום הלבן) והרחיזי את כל החלקים למשך 5 דקות. הוציאי את כל החלקים מהמים הרותחים מיד לאחר ההרתחה. יבשי באוויר עד לייבוש מוחלט לפני ההרכבה והשימוש הבא.

נקטי במשנה זהירות בעת ניקוי השסתום הלבן הקטן. השסתום חשוב לצורך

שאיבה תקינה. אין להשתמש בכוח מופרז ואין לנקות באמצעות מברשת לניקוי לבקבוקי תינוק או פטמות לבקבוקים. יש לרוחץ ידנית בעדינות במי סבון חמים ולשטוף מתחת זרם מים חמים.

הערה:

כנטי במשנה זהירות בעת ניקוי השסתום הלבן הקטן. השסתום חשוב לצורך שאיבה תקינה. אין להשתמש בכוח מופרז ואין לנקות באמצעות מברשת לניקוי לבקבוקי תינוק או פטמות לבקבוקים. יש לרוחץ ידנית בעדינות במי סבון חמים ולשטוף מתחת זרם מים חמים.

4. כיצד להרכיב את משאבת החלב הידנית של® Lansinoh

הערה:

לפני הרכבת משאבת החלב של® Lansinoh,

יש לוודא כי כל החלקים נוקו ועברו סטריליזציה כמפורט בסעיף 3 של מדריך זה.

- שטפי ידיים ביסודיות.
- הכניסי את הדורוך לתוך דיאפרגמת הסיליקון.
- מקמי את דיאפרגמת הסיליקון והזרוע על גבי גוף המשאבה. וודאי התאמה מאובטחת על גבי השפה על ידי לחיצה כלפי מטה באמצעות אצבעותיך, כדי לוודא היווצרות איטום מושלם.
- אבטחי בעדינות את השסתום הלבן למקומו במשאבה מלמטה, וודאי שהוא מיושר עם גוףהמשאבה. אין צורך להפעיל כוח מופרז בעת חיבור השסתום הלבן. אם את מתקשה לסיר את השסתום הלבן, סימן שדחפת אותו יתר על המידה אל תוך גוף המשאבה.
- הבריגי את הבקבוק לגוף המשאבה.
- התאימי את החרץ שבידית לדורץ, ולחצי את הידית כלפי מטה בעדינות. דחפי אותה עד שתשמעי קליק.
- התאימי את הדורוע ואת הידית, כך שהידית נכנסת לחרץ הראשון בדורוע המציין את שלב הגירוי*.
- הצמידי את מגן השד® ComfortFit אל גוף המשאבה.
- לאחר השלמת ההרכבה, על המשאבה להיראות כך.

*למשאבת חלב זו שני שלבים נפרדים, שלב הגירוי ושלב השאיבה.ניתן לעבור בקלות בין שני השלבים על ידי שינוי מיקום הידית על גבי הדורוע

5. כיצד להשתמש במשאבת החלב הידנית של® Lansinoh

אם ניתן, המתיני עד שאספקת חלב האם שלך ולוח זמני ההנקה שלך מבוטסים היטב. הדבר מתרחש בדרך כלל 3-4 שבועות לאחר הלידה, אלא אם כן הרופא/ה שלך אמר/ה לך אחרת.

- שטפי ידיים ביסודיות וודאי כי שדיך נקיים.

- וודאי כי ביצעת סטריליזציה למשאבה והרכבת אותה בזהירות, בדיוק כמפורט בסעיפים "כיצד לעקר ולנקות את משאבת החלב הידנית של®Lansinoh" ו"כיצד להרכיב את משאבת החלב של®Lansinoh".
- מרכיזי את פתח המשאבה מעל הפטמה שלך, ולחצי את המשאבה בעדינות על גבי השד. וודאי כי הפטמה ממורכזת בתוך תעלת מגן השד. לחצי בחוזקה את מגן השד® ComfortFit של המשאבה על גבי השד, וודאי שהוא אטום בצורה מאובטחת כך שאין בריחת אוויר. תוכלי ליצור איטום טוב על ידי תמיכה בשד מלמטה באמצעות ידיך השנייה.
- אם אינך מצליחה למרכז את הפטמה שלך בתעלת מגן השד מבלי שיווצר שפשוף, יתכן שתזדקקי למגן שד® ComfortFit במידה גדולה יותר.** כאשר תלחצי על ידית המשאבה בעדינות, תרגישי את כוח השאיבה המופעל על השד. אינך צריכה ללחוץ על ידית המשאבה עד הסוף כדי ליצור ואקום, אלא רק במידה הנוחה לך.
- תוכלי ליצור לחץ שאיבה עדין כדי להתכונן לשאיבת החלב על ידי כיוון הידית לחרץ הראשון (העליון) של הדורוע. וודאי כי הפטמה שלך זוה, ואז לחצי וושחררי את הידית עד שתמצאי את הקצב המועדף עלייך.

אזהרה:

אל תמשיכי לשאוב למשך יותר מחמש דקות בכל פעם אם לא מתקבלות תוצאות. נסי לשאוב שוב במועד אחר במהלך היום.

זכרי: אם השאיבה כאובת או לא נוחה במידה רבה, הפסיקי להשתמש במשאבה והתייעצי עם הרופא/ה שלך.

שימוש בטכנולוגיית שני השלבים של® Lansinoh

למשאבת חלב זו שני שלבים – שלב הגירוי ושלב השאיבה. ניתן לעבור בקלות בין שני השלבים על ידי שינוי מיקום הידית על גבי הדורוע.


שלב הגירוי

שלב זה מבצע גירוי עדין של השד. הוא מעוצב לחקות את האופן שבו תינוק יונק בתחילת ההנקה. זוהי אחת מן התכונות המעודדות את שחרור החלב, והיא מעודדת את התחלת זרימת החלב. תוכלי ליצור לחץ שאיבה עדין כדי להתכונן לשאיבת החלב על ידי כיוון הידית לחרץ הראשון (העליון) של הדורוע וביצוע פעימות מהירות עם הידית.

שלב השאיבה

שלב זה מאפשר שאיבת חלב אם מהשד. עברי לשלב זה באמצעות הזזת הידית לחרץ השני (התחתון) בדורוע. לשאיבה בעוצמה הגבוהה ביותר, לחצי על הידית עד הסוף. לשאיבה בעוצמה מופחתת, לחצי פחות בכוח על הידית. כדי להתחיל בשלב הגירוי, כווני את הידית לחרץ הראשון (העליון) בדורוע, ולחצי על הידית.חלב האם שלך יתחיל לזרום במהרה, אפילו אם לא תשתמשי במלוא עוצמת השאיבה שהמשאבה מסוגלת להפיק. לאחר שזרימת חלב האם מתחילה (לאחר 1-2 דקות) עברי לשלב השאיבה. כדי לעבור לשלב השאיבה, לחצי בעדינות את החלק המסומן ב-"PUSH" בקצה הידית כדי למקם את הידית בחריץ השני (התחתון) של הדורוע. המשיכי ללחוץ על הידית ולשחרר כדי להגיע ללחץ שאיבה מתאים. אם לחץ השאיבה מרגיש חלש בעת שאיבת חלב אם, לחצי על הידית עד הסוף. לחץ השאיבה שמתנה בהתאם למידה בה תלחצי על הידית. שאיבה נוחה חשובה יותר מלחץ שאיבה חזק. אנא שאבי חלב אם בלחץ שאיבה שמתאים עבורך.

*כדי לחזור לשלב הגירוי משלב השאיבה, משכי את קצה הדורוע בכיוונך, לחצי בעדינות על הידית ומקמי אותה בחריץ הראשון (העליון).

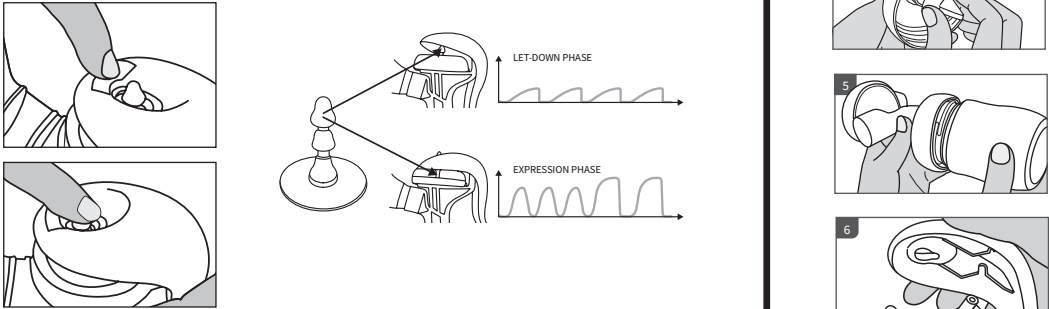

6. **הנחיות לאחסון חלב אם**
הנחיות לאחסון והפשרת חלב אם עבור תינוקות בריאים ובשלים. בדקי עם הרופא/ה שלך או יועצת הנקה מוסמכת לקבלת הוראות אחסון פרטניות. בעת הקפאת חלב אם, יש לאחסן אותו בחלק האחורי של המקפיא. אין לאחסן חלב אם בדלת המקפיא, מאחר ובעת פתיחה וסגירה של הדלת עלולות לחול תנודות בטמפרטורה. לפני אחסון, צייני תאריך עד כל מיכל של חלב אם, השתמשי קודם בחלב האם המתאריך המוקדם ביותר.

הפשרת חלב אם
הפשרי חלב אם קפוא במקרר, או הניחי את המכלים מתחת זרם מים קרירים, וחממי את המים בהדרגה עד להפשרת החלב. ניתן לשמור חלב מופשר במקרר למשך עד 24 שעות.**אין להקפיא מחדש חלב אם לאחר ההפשרה.** יש לערבב בעדינות חלב מופשר לפני ההאכלה על מנת לערבב את השכבות שנפרדו. חלב אם אינו הומוגני ושומן הח לב צף לחלקי העליון. הצבע והסמיכות של חלב האם עשוי להשתנות כתלות בשעה ביום שבו הוא נשאב, במזון שאכלת, ובגיל התינוק במועד השאיבה.

לייעוץ נוסף, פני לרופא/ה שלך.

אין לחמם חלב אם במיקרוגל! חימום במיקרוגל משנה את הרכב החלב. כמו כן, חימום במיקרוגל עשוי ליצור "נקודות חמות" בחלב העלולות לגרום לכוויות אצל התינוק. אין להפשרי חלב אם במים חמים או רותחים.

- טיפים לשאיבה**
- הכירי את המשאבה ואת חלקיה לפני השימוש בה.
- החלק החשוב ביותר בשאיבה מוצלחת הוא רפלקס שחרור החלב זהו הרפלקס המאפשר לחלב להגיע לאם שלך לזרום בתופעות. הנחת קומפרסים לחים וחסימים על גבי השדדים ועיסוי שדין של השדדים בתנועות מעגליות לפני /או/ במהלך השאיבה עשוי לסייע בעידוד רפלקס טבעי זה.
- נסה לבחור זמן לשאיבה בו אינך צריכה להזדרז ובו לא יפריעו לך גיסיון להירגע

- ולחשוב על תינוקך, או להתבונן בתמונה של תינוקך, עשויים לעזור בעת שאיבת חלב אם.
- שאיבת חלב ששויה להימשך בערך 20-30 דקות, אך הדבר תלוי בגופך. זכרי – שאיבה מוצלחת היא כישור נרכש. השאיבות הראשונות לצורכי תרגול עשויות להימשך זמן קצר יותר או ארוך יותר ממשך הזמן המצויין כאן, ובמהלכן עשויה להאסף כמות קטנה של חלב אם – אך אין פירוש הדבר שהגוף שלך אינו מייצר מספיק חלב או שאת עושה משווא לא נכון. חלב מיוצר על בסיס ביקוש ושאיבה לעתים קבועות בנוסף להנקת תינוקך מגרה את ייצור החלב ושומרת על אספקת חלב האם שלך.
- אם קיימות בעיות בהנקה, התייעצי עם הרופא/ה שלך. ביכולתך לשאוב חלב משד אחד תוך הנקת התינוק באמצעות השד השני.
- הדבר מאפשר יעילות שאיבה מרבית על ידי שימוש ברפלקס שחרור החלב שהתינוק היונק שלך מגרה.
- ודאי כי תעלת מגן השד שלך נוטה מעט כלפי מטה, כדי לאפשר לחלב האם תוכלי לזרום באופן טבעי כלפי הבקבוק.
- אין להפוך את המשאבה לאחר השאיבה.

אמצעי זהירות בעת שאיבת חלב אם:

- אין לחמם חלב אם במיקרוגל! חימום במיקרוגל משנה את הרכב החלב, וכמו כן עשוי ליצור "נקודות חמות" בחלב העלולות לגרום לכוויות אצל התינוק.
- יש לבדוק תמיד את הטמפרטורה של כל נוזל לפני האכלת התינוק שלך.
- אין לאפשר לילד לקחת בבקבוק למיטה או להאכיל את עצמו למשכי זמן ארוכים.
- למניעת סכנת חנק אפשרית, בדקי את חוזק הפטמה על ידי משיכה בחלק הכדורי שלה. אם מופיעים קרעים או סדקים כלשהם, הפסיקי את השימוש.

8. פתרון בעיות עבור משאבת החלב הידנית של® Lansinoh

היעדר שאיבה / שאיבה מופחתת

אם את מרגישה שנוצמת השאיבה פחתה, נסי את הדברים הבאים:

- וודאי שכל חלקי המשאבה יובשו והורכבו כהלכה.
- בדקי את השסתום הלבן לקרעיה או חורי סיכה. רכיב זה חיוני לשאיבה תקינה. אם יש צורך בכך, החליפי את השסתום הלבן בשסתום החלופי שסופק יחד עם המשאבה.
- וודאי כי דיאפרגמת הסיליקון והדורוע מוצמדים לגוף המשאבה באופן מאובטח ושנוצר איטום מושלם.
- ודאי כי מגן השד® ComfortFit מוצמד לשפת גוף המשאבה באופן מאובטח ושנוצר איטום מושלם.
- אם אינך מצליחה למרכז את הפטמה שלך בתעלת מגן השד מבלי שיווצר שפשוף, יתכן שתזדקקי למגן שד® ComfortFit במידה גדולה יותר.

במידה ולא מופק חלב אם

- אם אינך מצליחה לשאוב חלב כלל, נסי את הדברים הבאים:
- וודאי שכל חלקי המשאבה יובשו והורכבו כהלכה, ושמופקת עוצמת שאיבה מתאימה.
- נסי להירגע - שאיבה מוצלחת היא כישור נרכש, וייתכן כי יידרשו מספר ניסיונות לשם אימון על מנת להתחיל. כמו כן, עיסוי עדין של השדדים לפני השאיבה ובמהלכה עשוי לסייע לשחרור זרימת החלב.
- אנא עייני בסעיף "טיפים לשאיבה".

כאב בעת השאיבה

- אם את חווה כאב בעת שאיבת חלב אם, נסי את הדברים הבאים:
- ייתכן שאת שואבת בעוצמה רבה מדי. אין בהכרח צורך להשתמש במלוא עוצמת השאיבה שהמשאבה מסוגלת להפיק. נסי ללחוץ על הידית עד חצי הדרך.
- ייתכן שאת זקוקה למגן שד גדול יותר או קטן יותר. להזמנת חלקי חילוף או מגני שד גדולים יותר, אנא התקשרי למספר *6505 altman.co.il.
- או בקרי באתר האינטרנט: altman.co.il.


9. האכלת חלב אם באמצעות הפטמה הפריסטלטית® NaturalWave

הוראות שימוש:

מלאי בכמות הרצויה של נוזל והבריגי את המכסה למקומו בחוזקה. החימום במיקרוגל אינו מומלץ. אם תבחרי לחמם את המזון במיקרוגל, אל תסגרי את הבקבוק בצורה אטומה. הסירי את הפטמה, הצווארון והמכסה לפני שימוש במיקרוגל. נערי היטב לפני השימוש ובדקי תמיד את הטמפרטורה לפני מתן הבקבוק לתינוק. מזון שלא חומם באופן שווה עלול לגרום לכוויות בפה התינוק. אין לחמם חלב אם במיקרוגל, מאחר וחימום במיקרוגל משנה את הרכב החלב. לפני השימוש הראשון נקי את המוצר. כדי להבטיח את הוויגית המוצר, הניחי את הפטמה ואת הבקבוק על כל חלקי במים רותחים למשך 5 דקות לפני השימוש. בעת נשיאת בקבוק מלא, וודאי כי הוא סגור ומכוסה במכסה, והקפדי על מיקום הפטמה במרכז המכסה כדי להפעיל את תכונת "מניעת טפטוף" של המוצר.

ניקוי:
לפני השימוש הראשון, הניחי את המוצר במים רותחים למשך 5 דקות, אפשרי לו להתקרר, ושטפי ביסודיות את כל רכיבי הבקבוק. פעולות אלה מיועדות להבטחת הוויגיה. לאחר מכן, ניתן לשטוף את הבקבוק במדף העליון של מדיה הכלים ולבצע סטריליזציה שלו (כאשר הוא פתוח) במיקרוגל או באמצעות מכונת סטריליזציה מיוחדת. רחצי תמיד את כל רכיבי הבקבוק מיד לאחר כל שימוש. יש לרוחץ אותם במי סבון חמים ולשטוף היטב. יש לנקות לפני כל שימוש.

הרכבה:
לאחר ייבוש מוחלט, הכניסי את פטמת ההאכלה דרך חלקו העליון של צווארן המכסה המתברג. הבריגי את צווארון המכסה המתברג באופן מאובטח לצוואר הבקבוק.

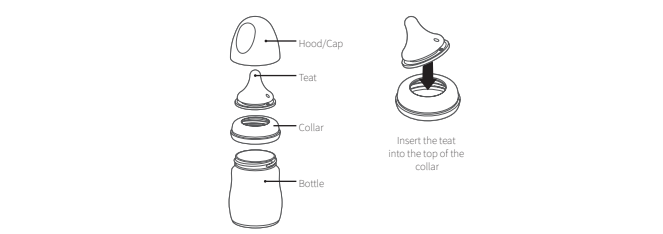

אמצעי זהירות:

יש לאחסן במקום יבש ומוצל כאשר המוצר אינו בשימוש. יש להשתמש במוצר זה תמיד בהשגחת מבוגר. אין לנקות, לאחסן או לאפשר למוצר לבזבז כמגע עם ממסים או כימיקלים חריפים. הדבר עשוי לגרום לנזק. אין להשאיר את המוצר כשהוא חשוף לאור שמש ישיר או לחום, או להשאיר אותו בתוך חומר חטוי ("תמיסות סטריליזציה") למשך זמן רב יותר מהמומלץ. אין לחמם את הנוזל על ידי הנחת הכוס במימין על גבי מלכתי המופעלת בגז או חשמל, פלטות חימום, תנורים חשמליים וכו'.

לשם בטיחות ובריאות ילדך – אזהרה!

יש להשתמש במוצר זה תמיד בהשגחת מבוגר. לעולם אין להשתמש בפטמות האכלה כמוצץ, יניקת נוזלים באופן ממושך וקבוע גורמת לעששת. יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון לפני ההאכלה. יש להרחיק את כל הרכיבים מהישיב ידם של ילדים כאשר אינם בשימוש. אין להשאיר את התינוק לבד עם ציוד ההאכלה עקב סכנת חנק, סכנת נפילה של התינוק, או אם המוצר פורק.

אזהרה:

יתכן עששת בקרב ילדים צעירים אפילו כאשר נעשה שימוש בנוזלים שאינם ממותקים. הדבר עשוי להתרחש אם מאפשרים לתינוק להשתמש בבקבוק/בכוסית למשך פרקי זמן ארוכים במהלך היום ובמיוחד בשעות הלילה בהן זרימת הרוק מופחתת, או אם מאפשרים לתינוק להשתמש בבקבוק כמוצץ. אין להשאיר את הפטמה כשהיא חשופה לאור שמש ישיר או לחום, או להשאיר אותה בתוך חומר חטוי ("תמיסת סטריליזציה") למשך זמן רב יותר מהמומלץ, מאחר והדבר עשוי להחליש את הפטמה. יש לבדוק לפני כל שימוש. יש להשליך עם גילוי סימן ראשון לנזק או חולשה. יש להחליף את הפטמה ל 7 שבועות, מכיוון בטיחותיות והיגיינות. יש למשך את פטמת ההאכלה מכל כיוון על מנת לבדוק את המוצר.

שימו לב:

מציג מסימים ותמיסות סטריליזציה עשויות לגרום לסיליקון לאבד את שקיפותו. הדבר לא משנה כל תכונה אחרת שלו. אין לחמם חלב אם במיקרוגל, מאחר וחימום במיקרוגל משנה את הרכב החלב. כמו כן, חימום במיקרוגל עשוי ליצור מוקדים מוקומיים של טמפרטורה גבוהה. נקטי במשנה זהירות בעת חימום במיקרוגל. יש לערבב תמיד מזון שחומם על מנת לוודא פיזור שווה של החום, ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההנשה.

© 2024 Lansinoh Laboratories, Inc. Lansinoh®, NaturalWave® ו-ComfortFit הם סימנים מסחריים רשומים של Lansinoh Laboratories, Inc., 2024. כל הזכויות שמורות.
תאריך הנפקת הרישום: 01/01/2024
יצרן: Lansinoh® Laboratories, Saglik Gerecleri Tasarim San.Tic. Ltd. Sti Zafer SB; יצרן: Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B Gaziemir/ Izmir 35410/ Turkiye
Mah. 35410 טורקיה.
גזימרי Mah. 35410 טורקיה.

יבואן ובעל רישום: אלטמן בריאות שותפות כללית.
מס' חברה: 540219987, כתובת: משה אביב 2, אור יהודה.
יצרן: מעבדות לנסינו.
ארץ ייצור: טורקיה.
מספר אישור אמ"ר: 15100417.

MAH and Importer: Altman Health General Partnership, 2 Moshe Aviv, Or Yehuda.
Approved by the Ministry of Health, registration approval number: 15100417.
Customer service: *6505

יש להשליך לפח חלקי אריזה מיותרים. יש להרחיק מהישיב ידם של ילדים ותינוקות.

יש להשתמש במוצר רק עבור השימוש לו הוא מיועד כפי שמתואר במדריך זה. אין להשתמש באביזרים שאינם מומלצים על ידי יצרן.

Throw away unnecessary packaging parts. Keep out of children's and baby's reach.

يجب رمي بقايا التغليف لـسلة المهملات
يجب إبعادها عن متناول أيدي الأطفال والأولاد.

Вывбросить в мусор отстатки упаковки.
Хранить в недоступном для детей и младенцев месте.

Lansinoh®

אמאן כאן בלביאלי!

ליעוץ אישי *6505 ☎ www.altman.co.il ✨
אלטמן משווק רשמי של לנסינו בישראל

אזהרה:

חומרי האריזה אינם חלק מהמוצר. לשם בטיחות ילדך, אנא הסירי והשליכי את כל חומרי האריזה לפני השימוש, אך קראי ושמרי את ההוראות לעתיד. יש להשאיר את המוצר פתוח במיקרוגל.

פירוש סמלים

📖 קראי ופעלי בהתאם להוראות השימוש

🏠 מזהה היצרן

📄 מציין את תאריך הייצור

📖 מציין את מספר החלק של המכשיר

📄 מציין את מספר האצווה

☀️ יש להרחיק את המכשיר מאור שמש

☂️ יש לשמור את המכשיר יבש

🥄 מציין כי האריזה מכילה מוצרים המיועדים לבוא במגע עם מזון

🍷 מציין כי המכשיר שברי ויש לטפל בו בזהירות

