

Lansinoh®

עלון לצרכן - משאבת חלב ידנית של לנסינו LANSINOH®

חשוב! יש לקרוא היטב את כל ההנחיות למשתמש המופיעות להלן לפני השימוש במוצר זה .

אנו מבזרים אתכם על שבחרת להעניק לתינוק שלך את ההתחלה הטובה ביותר בחיים באמצעות הנקה. ההנקה מציעה מגוון יתרונות בריאותיים עבורך ועבור תינוקך. כפי שהוכח על ידי מחקרים רבים ושונים. עם אף שתמיד מומלץ להניק, קשה לספק לתינוק חלב-אם כשאת לא נמצאת בקרבתו, למשל בעבודה. הדבר דורש מאמץ מיוחד, ועליך להיות גאה מאוד במחויבות שלך לספק לתינוקך את התזונה המשולמת להתפתחות אופטימלית. משאבת החלב שלנו מוצגת באופן המאפשר שימוש מהיר וקל עבור אמהות שצריכות לשאוב ושמעריכות את הנחות של משאבה ידנית.

ההנחיה: משאבת חלב ידנית של לנסינו מיועדת לשאיבה ואיסוף חלב אם של אישה מניקה. משאבת החלב הידנית של לנסינו מיועדת לשימוש אישי ואין להשתמש בה על ידי מספר אמהות.

הוראות שימוש: יש לקרוא הוראות אלה בקפידה ובמלואן לפני השימוש במשאבת החלב הידנית של Lansinoh® בפעם הראשונה.


תוכן עניינים:

- מבוא למשאבת החלב הידנית של Lansinoh®
- חלקי משאבת החלב הידנית של Lansinoh®
- כיצד לחטא ולנקות את משאבת החלב הידנית של Lansinoh®
- כיצד להרכיב את משאבת החלב הידנית של Lansinoh®
- עצות בנוגע לשאיבה
- כיצד להשתמש במשאבת החלב הידנית של Lansinoh®
- כיצד לאחסן את חלב האם שלך
- פתרון בעיות במשאבת החלב הידנית של Lansinoh®
- האכלת התינוק באמצעות פטמת ההזנה NaturalWave®

מבוא למשאבת החלב הידנית של Lansinoh®

משאבת החלב הידנית של Lansinoh® נבנתה במיוחד כדי לענות על הצרכים של אמהות מניקות. למשאבה יש שני מצבים נפרדים התואמים את שני שלבי השאיבה: שלב הגירוי (Let Down phase) ושלב השאיבה (Expression phase). ניתן להעביר בקלות ממצב אחד לשני על ידי התאמת מיקום הידית על הקנה. כרית השד ComfortFit™ יצרת איטום המספק ניקה יעילה המאפשרת זרימת חלב מהירה ונוחה. ניתן להתקין את מרבית בקבוקי האכלה בעלי פתח ההברגה הרחב על המשאבה הידנית של Lansinoh®. אריזה זו כוללת את פטמת NaturalWave® בעלת הזרימה האיטית המאפשרת לתינוק לשחור את פעולות הניקה הטבעיות שהתינוק לומד לבצע על השד בעת שתיית חלב-אם. הנקה בלעדיה היא בחירה טובה עבור תינוקך והיא מספקת את כל החומרים המזינים שתינוקך זקוק להם בחצי השנה הראשונה לחייו. ההנקה עוזרת לפתח קשר חזק בין האם והתינוק ומספקת תרונות רבים בטווח הארוך לשניכם.


2. טכנולוגיית שני מצבי שאיבה

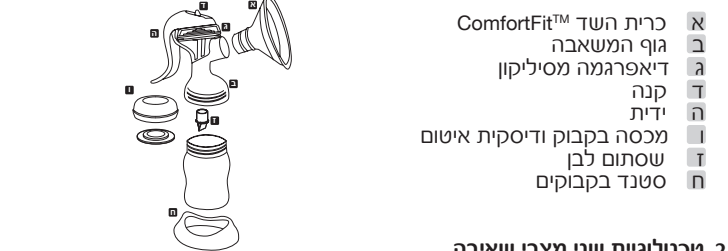

למשאבה זו יש שני מצבי שאיבה נפרדים, מצב גירוי ומצב שאיבה. ניתן להעביר בקלות ממצב אחד לשני על ידי התאמת מיקום הידית על הקנה.

מצב גירוי (let down)

מצב זה מגרה בעדינות את השד. הוא נועד לחקות את השלב הראשוני של ההנקה (האופן שבו התינוק ניזון בחתיחת ההנקה). את היותו מהפועלות המעודדות את שחרור החלב והיא מעודדת את החלב שלך להתחיל לזרום. ניתן ליצור לחץ ניקה עדין על ידי שחרור הידית בחריץ הראשון (העליון) של הקנה ובאמצעות שאיבות קצבצ מהיר עם הידית.

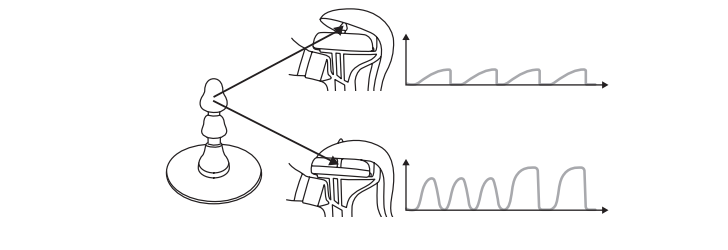

מצב שאיבה (expression)

מצב זה מאפשר לך להוציא חלב אם מתוך השד והוא מחקה את השלב השני של ההנקה. בשלב זה החלב הוא זורם בחופשיות. ניתן לעבור למצב זה על ידי העברת הידית לחריץ השני (החתחת) של הקנה. כדי להשיג עוצמת שאיבה מרבית יש ללחוץ על הידית עד הסוף. כדי להפחית את עוצמת השאיבה יש לשחרר את הידית.



י"ע! מנת לחזור למצב שחרור ממצב השאיבה, (1) משכי את קצה הקנה לכיוונו, (2) לחצי בעדינות על הידית, והעבירי אותה לחריץ הראשון (העליון).

אזהרה: אין להמשיך לשאוב במשך יותר מחמש דקות אם לא מושגת כל תוצאה אם לא משתחרר חלב). נסי לשאוב חלב בזמן אחר במהלך היום.
חשוב לזכור: במקרה והשאיבה נעשית מאוד כואבת או לא נוחה, עליך להפסיק להשתמש במשאבה ולהתייעץ עם רופא.



לאחר השלמת ההרכבה, המשאבה אמורה להיראות כך.

5. עצות בנוגע לשאיבה

חשוב להכיר את המשאבה וחלקיה לפני השימוש.

החלק החשוב ביותר לשאיבה מוצלחת הוא רפלקס שחרור החלב. זה קורה כשחלב האם שלך מתחיל לזרום בחופשיות. הפעולות הבאות יכולות לעזור לעורר את הרפלקס הטבעי: הניחי מאגר מחומם של פניני חום-קור של Lansinoh® (Lansinoh® breast therapy pack) על השד ובצעי תנועות קלות ומעגליות בקצה האצבעות מחוץ לשד לכוון הפטמה לפני ואז תוך כדי השאיבה.

נסי לשאוב כשאינך לחוצה בזמן וכאשר אף אחד לא מפריע לך. נסי להירגע תוך כדי שאת חושבת על תינוקך או מנסתכלת על תמונה של תינוקך בעת השאיבה.

השאיבה אמורה להתבצע בין 20 ל-30 דקות, אך זה תלוי בגוף שלך. זכרי, שאיבה מוצלחת היא מלאכה נרכשת. ניתן להתאמן על השאיבה במשך זמן קצר או ארוך יותר מהריל ויתכן ותופק כמות חלב קטנה יותר. אין זה אומר שהגוף שלך לא מייצר מספיק חלב או שאת עושה משהו לא בסדר. החלב מופק בהתאם להיצע ולביקוש ושאיבת חלב על בסיס קבוע (בנוסף להנקה) תעורר את אספקת חלב האם שלך ותשמר אותה.

במקרה של בעיה בהנקה, יש להתייעץ עם רופא. ניתן לשאוב משד אחד תוך הנקת התינוק עם השד השני. פעולה זו מאפשרת לך למקסם את אפקטיביות השאיבה באמצעות רפלקס שחרור החלב המופעל כשתינוקך יונק.

יש לוודא שתועלת כרית השד מושה קלות לכיוון מטה על מנת לאפשר לחלב האם שלך לזרום באופן טבעי לכיוון הבקבוק.

אמצעי זהירות בעת מותן חלב אם שנשאב:
1. אין לחמם חלב אם במיקרוגל! החימום במיקרוגל משנה את הרכב החלב ועלול גם ליצור "נקודות חמות" בחלב שיכולות לגרום לכווה אצל התינוק.
2. יש לבדוק טמפרטורה של כל נוזל המיועד להזינת התינוק טרם האכלתו.
3. אין לתת לתינוק לקחת בקבוק למשנה או לאכול לבד במשך זמן רב.
4. על מנת למנוע סכנת חנק, יש לבדוק את עוצמת הפיטום באמצעות מתיחה. יש להפסיק את השימוש אם מתגלים קרעים או סדקים בפטמה.

כיצד להשתמש במשאבת החלב הידנית של Lansinoh®

במידת האפשר, יש להמתין עד שאספקת חלב האם זומני ההנקה שלך יתייצב. בדרך כלל זה לוקח 3-4 שבועות לאחר הלידה, אלא אם כן קיבלת הוראה אחרת מרופא.

- יש לשטוף את הידיים היטב ולוודא שהשדיים שלך נקיים.
- לפני כל שימוש במשאבה יש לוודא שחיטאת והרכבת בקפידה את המשאבה** בדיוק כפי שנתואר בחלקים "כיצד לנקות ולחטא את משאבת החלב הידנית של Lansinoh®" ו-"כיצד להרכיב את משאבת החלב הידנית של Lansinoh®".
- יש למקם את פתח המשאבה במרכז הפטמה שלך וללחוץ את המשאבה בעדינות כלפי השד שלך כדי לוודא שהפטמה נמצאת במרכז התעלה של כרית השד. יש ללחוץ על כרית השד ComfortFit™ ששל המשאבה בחוזקה כנגד השד שלך; יש לוודא שהמשאבה אטומה ללא בריחת אוויר. ניתן להשיג איטום טוב על ידי שימוש ביד השנייה לתמיכה בשד מלמטה.
- בוערך דוחפת בעדינות את ידית המשאבה כלפי מטה תרגישי את הניקה על השד. אין צורך ללחוץ על הסוף כדי ליצור ואקום; אלא רק עד מידה שמרגישי את נוח.
- ניתן ליצור לחץ ניקה קל בהכנה לשחרור החלב על ידי העברת הידית לחריץ הראשון (העליון) של הקנה. עליך לוודא שהפטמה שלך נעה וללחוץ ולשחרר את הידית עד שתמציאי את הקצב המועדף עליך.
- על מנת להתחיל את מצב השחרור, יש להעביר את הקנה לחריץ העליון (הראשון) של החלב וללחוץ על הידית. חלב האם שלך יתחיל לזרום עד מהרה גם אם לא תשתמשי בכל כוח הניקה שהמשאבה יכולה ליצר.
- ברגע שחלב האם מתחיל לזרום (1-2 דקות) יש להעביר למצב השאיבה. על מנת להעביר למצב השאיבה, יש ללחוץ על כפתור ה"PUSH" בקצה הידית כדי להעביר את הידית לחריץ השני (החתחת) של הקנה. יש להמשיך ללחוץ ולשחרר את הידית עד שתמציאי את לחץ הניקה המתאים לך.

במקרה ולחץ הניקה מרגיש לך חלש בעת שאיבת חלב האם שלך, יש ללחוץ את הידית עד הסוף. לחץ הניקה משתנה בהתאם לעוצמת הלחיצה. חשוב יותר לשאוב בנחות מאשר להשיג לחץ ניקה גבוה. שאבי את החלב בלחץ ניקה שמרגיש לך מתאים.

י"ע! מנת לחזור למצב שחרור ממצב השאיבה, (1) משכי את קצה הקנה לכיוונו, (2) לחצי בעדינות על הידית, והעבירי אותה לחריץ הראשון (העליון).

אזהרה: אין להמשיך לשאוב במשך יותר מחמש דקות אם לא מושגת כל תוצאה אם לא משתחרר חלב). נסי לשאוב חלב בזמן אחר במהלך היום.
חשוב לזכור: במקרה והשאיבה נעשית מאוד כואבת או לא נוחה, עליך להפסיק להשתמש במשאבה ולהתייעץ עם רופא.

7. כיצד לאחסן את חלב האם שלך

יש לאחסן חלב אם בכלי נקי ואטום. אין לאחסן חלב אם בדלת המקרר או המקפיא. הדלת נוטה להיות החלק החם ביותר של המקרר או המקפיא בגלל הפקידה והסגירה. יש לרשום תאריך על כל מיכל של חלב אם המאוחסן ולהשתמש בחלב הישן יותר תחילה.
נסי את שקיות אחסון חלב האם של Lansinoh®:
• פתרון אידיאלי לאחסון והקפאת חלב אם
• סגירה אפולה לאיטום ייחודי למניעת נזילות ושפיכות
• שקית חזקה במיוחד

מקום	טמפרטורה	זמן
טמפרטורת החדר (חלב טרי)	19c° עד 26c°	4 שעות (אידיאלי) עד 6 שעות (אפשרי)**
מקרר	4c° עד 6c°	72 שעות (אידיאלי עד 8 ימים (אפשרי)**)
מקפיא	-18c° עד -20c°	6 חודשים (אידיאלי)

*מומלץ לקרר או להקפיא את החלב מיד לאחר השאיבה. מקור: ליגת לה ל'צה הבינלאומית להתאמות (La Leche League International)

הפשרה:


יש להפשרי חלב-אם קפוא במקרר או להניחו בכלי מתחת למים קרים זורמים ולהעלות את טמפרטורת המים בהדרגתיות עד למים פושרים ושהחלב מפשיר. ניתן לאחסן חלב-אם מופשר במקרר (באריזה שנשמרה אטומה) למשך עד 24 שעות.

אין להקפיא שוב חלב-אם לאחר שהופשר.

יש לנער בעדינות את הכלי עם חלב האם המופשר לפני שמזינים אותו לתינוק על מנת לערבב את השכבות שהתרכזו. חלב אם אינו הומוגני והשכבה השומנית נוטה לעלות לראש הבקבוק. הצבע והשומנות של חלב האם עשויים להשתנות בהתאם לשעה שבה הוא נשאב, לאוכל שאכלת, ולזיל התינוק בעת השאיבה. אין לנער את הבקבוק בעוצמה כדי לערבב בעדינות את השכבות מכיוון שפעולה זו עלולה לגרום נזק למרכיבים החיים של חלב האם שלך.

אין לחמם חלב אם במיקרוגל! חימום במיקרוגל משנה את הרכב חלב האם. חימום במיקרוגל עלול גם ליצור "נקודות חמות" בחלב שיכולות לגרום לכווה אצל התינוק.

אין להפשרי חלב אם באמצעות מים חמים מאוד או רותחים.

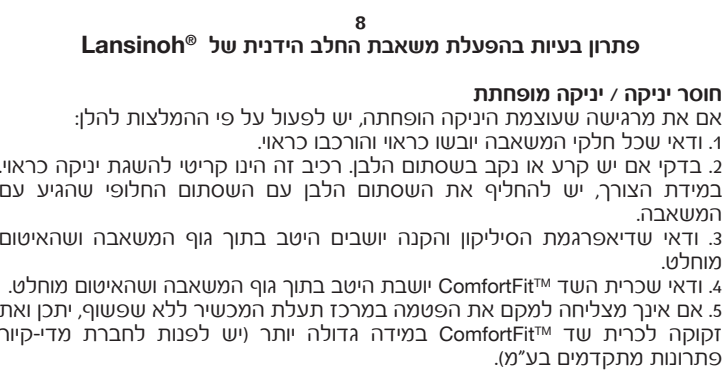

חוסר ניקה / ניקה מופחת

אם את מרגישה שעוצמת הניקה הופחתה, יש לפעול על פי ההמלצות להלן:
1. ודאי שכל חלקי המשאבה יובשו כראוי והורכבו כראוי.
2. בדקי אם יש קרע או נקב בשסתום הלבן. רכיב זה הנו קרשי להשגת ניקה כראוי.
3. ודאי שדיאפרגמת הסיליקון והקנה יושבים היטב בתוך גוף המשאבה ושהאיטום מוחלט.
4. ודאי שכרית השד ComfortFit™ יושבת היטב בתוך גוף המשאבה ושהאיטום מוחלט.
5. ודאי שכרית השד ComfortFit™ יושבת היטב בתוך גוף המשאבה ושהאיטום מוחלט.

כאב בעת השאיבה

אם את חווה כאב בעת שאיבת החלב, נסי את הפעולות הבאות:

- יתכן שאת שואבת חזק מדי. אין צורך להשתמש במלוא עוצמת הניקה שהמשאבה מסוגלת ליצר. נסי ללחוץ על הידית עד האמצע וזכרי את הקצב המומלץ של 3-2 שניות.
- יתכן את זקוקה לכרית שד גדולה יותר.
- התייעצי עם גורם מקצועי (כגון יועצת הנקה מוסמכת ו/או רופא).

אמצעי זהירות: כשהמוצר לא בשימוש, יש לאחסנו במקום יבש ומוכסה. אין להשתמש במוצר זה ללא היתר מרשם הורר. אין לאפשר למוצר להוצר לבוא במגע עם תמיסות או כימיקלים קשים. פעולות שכאלו עלולות לגרום לנזק. אין להשאיר את המוצר באור שמש ישיר או בקרבת חום, או להשאיר אותו בחומר חיוטי ("תמיסות חיוטיות") במשך זמן ארוך יותר מהמומלץ. אין לחמם את הנוזל על ידי הנחת הכוס ישירות על הגז או על פלטה חשמלית, תנור חשמלי וכו'.

אזהרה! ילדכם ובריאותו! הקפידו להשתמש במוצר זה בהשגחת אדם בוגר. לעולם אין להשתמש בפטימה בתור מוצץ. ניקה ממושכת של נוזלים לאורך זמן פשויה לגרום לעששת שהיניים. בכל מקרה בדוק את טמפרטורת המזון לפני ההזנה. יש להרחיק את כל הרכיבים שאינם בשימוש מהישג ידם של תינוקות וילדים. אין להשאיר את התינוק לבד עם ציוד שתייה עקב סכנת חנק. נפילת התינוק או התפרקות המוצר.

אזהרה: עששת בקרב ילדים קטנים עלולה להתפתח אפילו אם לא נעשה שימוש בנזולים ממותקים. הדבר קורה אם התינוק משתמש בבקבוק/כוס למשך תקופות זמן ארוכות לאורך היום ובעיקר בשעות הלילה, כאשר זרימת הרוק מופחתת או אם הוא משתמש בהם בתור מוצץ. אין להשאיר את הפטמה באור שמש ישיר או בקרבת חום, או להשאיר אותו בחומר חיוטי ("תמיסות חיוטיות") למשך זמן ארוך יותר מהמומלץ, מכיוון שזה עלול להחליש את הפטמה. יש לבדוק את הפטמה לפני השימוש. יש להשליך את הפטמה אם נמצא סימן סכנה לנזלוה לנזק או היחלשות. יש להחליף את הפטמה כל 7 שבועות, מסביבות של כשיטות והיגיינה. יש למתן את פטמת ההזנה לכל הכיוונים כדי לבדוק את האחורי של לשון התינוק עולה, ומתעלה את החלב לתוך הוושט.

שיני לב: מציגים מסוימים ותמיסות סטריליות יכולים לגרום לסיליקון להפוך לאטום. הדבר אינו משנה את מאפייני המוצר. אין לחמם חלב אם במיקרוגל מכיוון שהחימום במיקרוגל משנה את הרכב החלב. חימום במיקרוגל עלול ליצור טמפרטורות מקומיות גבוהות. יש לנקוט בהזהירות יתרה בעת החימום במיקרוגל. יש תמיד לערבב מזון מחומם על מנת לוודא שתפוצת החום שווה ולבדוק את הטמפרטורה לפני ההגשה.

אזהרה: חומרי האריזה אינם חלק מהמוצר. למען בטיחות ילדך, יש לסלק ולהשליך את כל חומרי האריזה לפני השימוש, אך לקרוא ולשמור את ההוראות לצורך עיון עתידי. יש להשאיר פתוח במיקרוגל.

יצרן: Lansinoh® Laboratories, Sağlık Gereçleri Tasarım San.Tic. Ltd. Sti Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B Gazimir/ Izmir 35410/ Türkiye סג'יל איזמיר 35410/טורקיה.

9. האכלת התינוק באמצעות פטמת ההזנה NaturalWave®

פטמת ההזנה NaturalWave® נועדה במיוחד כדי:
• לעזור לשמך דפוסי הנקה מבוססים.
• לעבור בקלות מהנקה לבקבוק ולהיפך.
• לעודד את תנועת הלשון ה"גלית" של התינוק.
• לעודד את פעולת הניקה האינסטינקטיבית להתפתחות אוראלית טבעית.

1. נעילה
הפטמה נפתחת כלפי חוץ וננעלת על הרקמה שמסביב לפטמה.

2. תנועת לשון גלית
הלשון נעה בתנועה "גלית" כדי להפעיל לחץ על הפטמה ולהוציא חלב. פעולה זו מועדדת התפתחות טבעית של הפה, הלסת והפנים.

עובדה: הלשון של התינוק חוזרת על התנועה הגלית 800 עד 1000 פעמים בהנקה אחת.

3. בליעה
החלק האחורי של לשון התינוק עולה, ומתעלה את החלב לתוך הוושט.

פטמת ההזנה NaturalWave® תוכננה כדי לעודד את דפוס ההזנה הטבעי.

1. קצה הפטמה

2. 100% סיליקון רך
נמתח ומתכווץ לקבלת דחיסה אופטימלית.

3. חריצים אנכיים פנימיים
מחזקים את מבנה הפטמה, ומגנים עליה מפני קריסה.

4. עיצוב מפועל הדרגתי ייחודי
מאפשר תנועת לשון סיבובית חלקה.

5. קטטורת בזזיס רחבה
לנעילה קלה וניקה יעילה.

6. AVS™
מפחית את כניסת האוויר, אחד מהגורמים האפשריים לקוליק.



הוראות שימוש: מלאי את כמות הנוזל הנדרשת וחזקי את המכסה המתברג. לא מומלץ לחמם נוזלים המיועדים להזינת תינוקות במיקרוגל. אם בכל זאת חברת לחמם במיקרוגל, אל תאטמי את הבקבוק. הסירי את הבקבוק, הטבעת והמכסה בעת השימוש במיקרוגל. יש לנער לפני השימוש ותמיד לבדוק את הטמפרטורה לפני שנותנים לתינוק. מזון שמחומם באופן לא מאוזן עלול לגרום לכווה בפה התינוק.
אין לחמם חלב אם במיקרוגל מכיוון שהחימום במיקרוגל משנה את הרכב החלב.
לפני השימוש הראשון, יש לנקות את המוצר. כדי לוודא שהמוצר היגייני, יש להכניס את הפטמה ואת הבקבוק עם כל רכיביו לתוך מים רותחים במשך 5 דקות לפני השימוש. יש לוודא שהבקבוק והחלקים השונים התקררו לחלוטין לפני השימוש. אם את מחזיקה בקבוק מלא, ודאי שהוא סגור עם המכסה, הקפידו שהפטמה תהיה במרכז המכסה כדי למנוע נזילה.

ניקיון: לפני השימוש הראשון, יש להניח את המוצר במים רותחים במשך 5 דקות, לחכות שהמים יתקררו, ולשטוף בקפידה את כל רכיבי הבקבוק. פעולה זו תבטיח שהמוצר היגייני. לחילופין, ניתן גם לשטוף את הבקבוק בתא העליון של מדיח כלים וניתן לחטא (כשהבקבוק פתוח) הן במיקרוגל והן באמצעות מכשיר סטריליזציה המתאים לחיטוי בקבוקי האכלה לתינוקות. יש תמיד לשטוף את כל הרכיבים של המוצר מיד לאחר כל שימוש. יש לרוחץ במים חמים עם סבון ולשטוף היטב. יש לנקות לפני כל שימוש.

הרכבה: לאחר ייבוש יסודי, יש להכניס את פטמת ההזנה דרך ראש טבעת הפקק המתברג. יש לחבר את טבעת הפקק המתברג היטב לצוואר הבקבוק.

הרכבה: לאחר ייבוש יסודי, יש להכניס את הפטמה לתוך ראש הטבעת


יש להכניס את הפטמה לתוך ראש הטבעת

אנחנו כאן בשבילך!

ליעוץ אישי *6505 ☎ www.altman.co.il

אלטמן משווק רשמי של לנסינו בישראל

אין לראות במידע המופיע בעלון זה משום המלצה רפואית ו/או אבחנה רפואית ו/או המלצה לשימוש באביזרים רפואיים לרבות אלה שמידע אודותם מופיע בעלון זה. כל המידע המופיע בעלון זה אינו נועד להחליף התייעצות עם רופא ומ/או יועצת הנקה מוסמכת (IBCLC). יש לקרוא היטב את הוראות השימוש והאזהרות וכן את העלון לצרכן המצורף למוצר. יש לנהוג בהתאם להוראות ואזהרות אלה. בכל מקרה לא כאבים ו/או חוסר נוחות / תגובה גופנית למוצרים - יש להפסיק מיד את השימוש ולפנות לרופא.

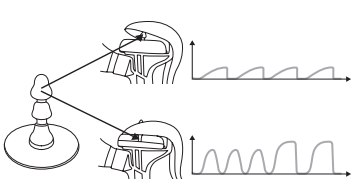

AR LANSINOH® إرشادات استخدام مضخة الثدي اليدوية

نننتك على قرارك بأن تختفي طفلك الرضيع أفضل بداية ممكنة في الحياة بالرضاعة الطبيعية. حيث تؤكد الأدلة الكثرة المبنية لمزايا العديدة للرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل الرضيع. رغم أن لبن الأم هو الأفضل دائماً، لكن إرضاع طفلك أثناء وجودك بالخارج ليس أمراً سهلاً باستمرار. إذ يتطلب ذلك منك جهداً خاصاً، وينبغي أن تكوني فخوراً بالتزامك بتوفير التغذية الطبيعية لطفلك حتى يحظى بنمو وتطور مثالي. لقد صُممت مضخة الثدي اليدوية لكي تستخدمها بسرعة وسهولة الأمهات اللاتي يحتجن لشطف اللبن من حين لآخر واللاتي يفضلن استخدام المضخة اليدوية.

الاستخدام المستهدف لمضخة الثدي: الغرض من مضخة الثدي اليدوية Lansinoh هو سحب وتجميع حليب المأراه الممرضه. مضخة الثدي Lansinoh مصممه لاستخدام شخصي للأم ولا يقبل .

إرشادات الاستخدام:

يرجى التأني في قراءة هذا الدليل قبل استخدام مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh" للمرة الأولى.

المحتويات:

1. التعريف بمضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"
2. أجزاء مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"
3. كيفية تعقيم وتنظيف مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"
4. كيفية تركيب مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"
5. نصائح حول شطف اللبن "Lansinoh"
6. كيفية استخدام مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"
7. كيفية تخزين اللبن المشفوط من الثدي
8. إصلاح مشكلات مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"
9. الرضاعة الطبيعية باستخدام حلمة "NaturalWave"

1

التعريف بمضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"

صممت مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh" خصيصاً لتلبية احتياجات الأمهات المرضعات. تتكون هذه المضخة من مرحلتين: مرحلة التنزِيل ومرحلة الشفط. ويمكن التبدل بين النمطين بضبط موضع المقبض على عمود المضخة. يوفر مسند الثدي "ComfortFit" تثبيت المحكم لضمان الشفط والتدفق السريع والمريح للثدي. يمكن تبديل زراحتي الصنع الواسعتين في تشكيلة مضخات "Lansinoh" بالكامل. تشمل العبوة على حلمة الشفط الطبيي "NaturalWave" التي تساعد طفلك على استخدام حركات الشفط الطبيعي التي تعلمها عند الرضاعة من الثدي عند إرضاعه لبِ الأم من خلال زراجة. وتتماز المضخة بسهولة تركيبها واستخدامها وتنظيفها.

الرضاعة الطبيعية هي الأفضل. الرضاعة الطبيعية هي الخيار الأفضل وتوفر لطفلك كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في الشهور الستة الأولى. وتساعد الرضاعة الطبيعية على تكوين صلة قوية بين الأم وابنها، وتحقق مزايا عديدة لتكهيها على المدى الطويل.

2

أجزاء مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"

(يرجى الرجوع إلى ملحق ألف)

- 1 مسند الثدي "ComfortFit"
- 2 جسم المضخة
- 3 حاجز من السيليكون
- 4 حجاب الصعود
- 5 المقبض
- 6 غطاء الزراجة وقصر الإغلاق
- 7 حامل إبيض
- 8 حامل الزراجة

مضخة تعمل مرحلتين

تعمل مضخة الثدي مرحلتين: الأولى هي مرحلة التنزيل والثانية هي مرحلة الشفط. تتكون هذه المضخة من مرحلتين: مرحلة التنزيل ومرحلة الشفط. ويمكنك التبدل بين النمطين بضبط موضع المقبض على عمود المضخة.

مرحلة التنزيل

في هذه المرحلة تقوم المضخة بتحفيز الثدي. صُممت هذه المرحلة لتقليد المرحلة الأولى من الرضاعة الطبيعية (بالأولوب الذي يبدأ فيه الطفل مص اللبن خلال الرضاعة). وهي من إحدى المزايا التي تحدث على نزول اللبن وتيسل الحليب يتدفق من الثدي. يمكن الضغط برفق لشفط اللبن من خلال وضع المقبض في الشق الأول (العلوي) من العمود وباستخدام نبضات سريعة بالمقبض.

10 بعد الانتهاء من تركيبها، ينبغي أن تبدو المضخة بالشكل التالي:

*صممت هذه الأجزاء لكي تتلام مع بعضها البعض بشكل مريح. لسهولة التركيب، بللي حافة حاجز السيليكون ببعض الماء.

**تتكون مضخة الثدي من مرحلتين: الأولى هي مرحلة التنزيل والثانية هي مرحلة الشفط. ويمكنك التبدل بين المرحلتين بتحديد موضع المقبض على عمود المضخة.

5

نصائح حول شطف اللبن

تعرفي على المضخة والأجزاء قبل الاستعمال.

يمكن الجزء، المهم للغاية للشفط الناجح في مرحلة التنزيل، وذلك عندما يبدأ اللبن ينساب بحرية من ثديك. يساعد ما يلي على حدوث استجابة طبيعية: ضعي طبل من جرة علاج الثدي "Therapearl" Lansinoh على Breast Therapy Gel في الثدي ودلكي بحركات خفيفة دائرية بأطراف أصابعك من خارج الثدي باتجاه الحلمة قبل وأثناء مرحلة الضخ.

حاولي اختيار وقت مناسب لضخ اللبن لا تكوني فيه متعبة ولا يتم مقاطعتك. حاولي الاسترخاء ويمكنك التفكير في طفلك أو التطلع إلى صورة له لتشجيعك ومساعدتك عند ضخ اللبن.

تستمر جلسة الضخ بصفة عامة من 20 إلى 30 دقيقة ولكن ذلك يعتمد على طبيعة جسّدك. تذكري أن الضخ الناجح فن مكتسب فيجلسات التمرين الأولى قد تكون أقصر أو أطول مما أوضحت، وقد تؤدي إلى شفط كمية صغيرة من اللبن ولكن هذا لا يعني أن جسّدك لا ينتج اللبن الكافي أو أنك تفعلين شيء خاطئ. يتم إنتاج اللبن حسب الطلب والعرض، وسيحفز الثدي اللبن من ثديك باستمرار بالإضافة إلى إرضاع طفلك كمية اللبن التي تحتاجها جسّدك.

إذا حدثت مشكلات في الرضاعة، ينبغي استشارة الطبيب المختص.

يمكنك ضخ اللبن من ثدي واحد وتضعين طفلك من الثدي الآخر. وهذا يتيح لك تعقيم فعالية الضخ باستخدام عملية التنزيل التي يحفزها التامم طفلك لثديك.

تأكدتي من ميل تجويف مسند الثدي للأشفل قليلاً حتى ينساب اللبن بصورة طبيعية تجاه الزراجة.

الاحتياطات عند إعطاء طفلك اللبن المشفوط:

1. لا تسخني اللبن البشري في الميكرويف. يغير التسخين في الميكرويف تكوين اللبن، وربما يؤدي إلى إيجاد "نقاط ساخنة" في اللبن تؤدي إلى تسع طفلك.
2. اختبر درجة حرارة اللبن دائماً من أي سائل قبل إعطاء طفلك.
3. لا تتركي طفلك ينام بزراجة الرضاعة أو يرضع نفسه لفترات طويلة.
4. لا تملح طعام المحتمل. اختبري قوة الحلمة من خلال سحب الجزء المنفوخ. توقفني عن الاستخدام عند ظهور أي تمزقات أو شقوق.

6

لتعقيم باستخدام البخار أو معقمات الميكرويف: اتبعي إرشادات جهات التصنيع. تأكدتي أن كل الأجزاء متجهة لأشفل في المعقم. احرصي على غسل يديك قبل إزالة المكونات من المعقم.

4

كيفية تركيب مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"

ملاحظة: قبل تركيب مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh" يرجى التأكد من تنظيف وتعقيم قبل الأجزاء على النحو الموضح في القسم 3 من هذا الدليل.

(للملحق ب،)

- 1 اغسلي يديك جيداً.
- 2 ضعي العمود في حاجز السيليكون.
- 3 ضعي حاجز السيليكون والعمود أعلى جسم المضخة. تأكدتي من الملاءمة بإحكام للحافة بالضغط برفق بأصابعك لضمان إحكام الإغلاق.
- 4 ضعي الصمام برفق على المضخة من أسفل. مع التأكد من معاداة الصمام الأبيض لجسم المضخة. ليس من الضروري الضغط بقوة مفرطة عند تركيب الصمام الأبيض. إذا اكتشفت أنه من الصعب إزالة الصمام الأبيض، فإن ذلك يعني أنك ضغطتي كثيراً في جسم المضخة.
- 5 لفي الزراجة على جسم المضخة.
- 6 قومي بمحاذاة التمرجات في المقبض مع العمود واضغطي برفق على المقبض لأشفل. اضغطي حتى تسمعي صوت تكة.
- 7 اضغطي للعمود والمقبض بحيث يلامس المقبض الشق الأول في العمود المعروف وهي العملية المعروفة باسم مرحلة التنزيل.
- 8 اربطي مسند الثدي "ComfortFit" بجسم المضخة.
- 9 لكي تجعلي المضخة مستقرة تماماً، أدخلي الزراجة في حامل الزراجة.

6. لبدء مرحلة التنزيل، حددتي العمود على الشق الأول (العلوي) من المقبض ثم اضغطي على المقبض. سيبدأ اللبن في الانساب حتى لو لم تستخدمي كل قوة الشفط التي تستطيع المضخة بولها.

7. عند تدفق اللبن (دقيقة أو دقيقتين) انتقلي إلى عملية الشفط. للانتقال إلى عملية الشفط، يرجى الضغط على جزء "PUSH" في طرف المقبض للمقبض على الشق الثاني السفلي من المقبض. هي مرحلة الشفط على المقبض وإلاته حتى يمكنك تحديد موضع المقبض الرضاعة المناسب.

إذا كان ضغط السحب ضعيفاً أثناء ضخ اللبن، اضغطي على المقبض حتى النهاية. سينتج ضغط السحب بناءً على قوة الضغط على المقبض. شطف اللبن بإيقاع مريح أكثر أهمية من الضغط بقوة للحصول على الضغط. يرجى ضخ اللبن بقوة شفط ملائمة لك.

*العودة إلى مرحلة التنزيل من مرحلة الشفط، اسحبي طرف العمود تجاهك (2) واضغطي على المقبض برفق وضعيه في الشق الأول (العلوي).

تحذير: لا توافلي الضخ لأكثر من خمس دقائق في المرة الواحدة إذا لم تحسلي على نتيجة فعالة. حاولي شطف اللبن في وقت آخر خلال اليوم. يرجى تذكر ما يلي: إذا أصبح الضخ غير مريحاً أو مؤلماً، ينبغي أن توقفني عن استخدام المضخة وتستشيري طبيبك المختص.

7

كيفية تخزين اللبن المشفوط من الثدي

ينبغي تخزين لبن الأم في وعاء نظيف محكم الإغلاق. لا تقومي تخزين اللبن في باب التلاجة أو المجمد. لأن الباب عادة ما يكون الجزء الأكثر دفئاً من التلاجة أو المجمد بسبب الفتح والغلق المتكرر. سجلتي تاريخ سحب لبن وعاء من اللبن واستخدمي الأقدم دائماً.

جربي أكياس "Lansinoh" لتخزين اللبن:

- مثالية لتخزين لبن الثدي بجميده
- طريقة ممتعة وسهلة للطفل المحكم لمنع التسرب أو الانسكاب
- أقوى أكياس متاحة

إرشادات تخزين لبن الثدي		
المكان	درجة الحرارة	الوقت
في درجة حرارة الغرفة (الثلث)	19 درجة إلى 26 درجة	4 ساعات (مدة مثالية) حتى 6 ساعات (مدة مثالية) **
في البراد أو التلاجة	4 درجات إلى 6 درجات	72 ساعة (مثالية) حتى 8 أيام (مدة مثالية) **
في المجمد	18- درجة إلى - 20 درجة	9 شهور (فترة مثالية) حتى 12 شهراً (فترة مثالية)

*يفضل تجميد أو تبريد اللبن بعد شفطه مباشرة.

المراجع: La Leche League International

إذنبني لبن الأم للمجمد في التلاجة أو ضعي الحلاوة تحت ماء بارد مع تسخين الماء تدريجياً حتى يتدفق اللبن. يمكن حفظ اللبن المذاب في التلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة. لا تعيدي تجميد لبن الأم بعد إذابته.

حري زراجة أو وعاء لبن الأم المذاب برفق قبل إعطاء الطفل لشفط طبقات اللبن التي فصلت من بعضها أثناء التجميد والإذابة. لبِ الأم ليس متجانساً وتستمد القشدة إلى أعلى الزراجة. قد يختلف لبِ الأم في اللون والقوام حسب وقت اليوم الذي شفط فيه وعلى الطعام الذي تناولته لبنك وعلى عمر الطفل أثناء ضخ اللبن. لا تهزي الزراجة بعنف لحفظ طبقات اللبن لأن ذلك سيؤدي إلى تلف المكونات الحية في لبِ الأم.

1. اغسلي يديك جيداً وتأكدتي من نظافة ثديك.
2. احرصي على تعقيم المضخة وتركيبها بعناية بالضبط مثلما أوضحنا في القسمين "كيفية تنظيف وتعقيم مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh" و"كيفية تركيب وتجميع مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh".

ضعي حلمة ثديك في منتصف فوهة المضخة، واضغطي برفق على ثديك مع ضمان وجود الحلمة في منتصف تجويف مسند الثدي. اضغطي على مسند الثدي "ComfortFit" بنبات على ثديك مع الحرص على إحكام التثبيت حتى لا يتسرب الهواء. يمكنك إحكام التثبيت باستخدام يدك الأخرى لدعم ثديك في منتصف التجويف في إذا كانت حلمة الثدي غير ملائمة لتصبح إلى حجم أكبر من مسند وسادة الثدي دون فرق، فأنت بحاجة إلى حجم أكبر من مسند الثدي "ComfortFit".

4. أثناء الضغط برفق على مقبض المضخة ستسمعين بقوة الشفط الذي "ComfortFit".
4. أثناء الضغط برفق على مقبض المضخة ستسمعين بقوة الشفط الذي "ComfortFit".
4. أثناء الضغط برفق على مقبض المضخة ستسمعين بقوة الشفط الذي "ComfortFit".
4. أثناء الضغط برفق على مقبض المضخة ستسمعين بقوة الشفط الذي "ComfortFit".
5. يمكنك الضغط برفق لشفط اللبن من خلال وضع المقبض في الشق الأول (العلوي) من المقبض. تأكدتي من حركة الحلمة تاً ثديك واضغطي على المقبض وأقلتيه حتى تجدي الإيقاع المناسب.

8

إصلاح مشكلات مضخة الثدي اليدوية "Lansinoh"

لا يوجد شفط/ضعف قوة الشفط

إذا شعرتي بتناقض قوة الشفط، يرجى تجربة الخطوات التالية:

1. تأكدتي من تعقيم كل أجزاء المضخة وتركيبها بشكل سليم
2. فحصي الصمام الأبيض للتأكد من عدم وجود أي تمزق أو ثقوب. جزء الصمام الأبيض في غاية الأهمية للحصول على قوة شفط مناسبة. يرجى تغيير الصمام الأبيض إذا لزم الأمر بالصمام الاحتياطي المقدم مع المضخة.

3. يرجى التأكد من ملائمة حاجز السيليكون والعمود بإحكام لجسم المضخة ومن إغلاقهما بإحكام.

4. يرجى التأكد من ملائمة مسند الثدي "ComfortFit" بإحكام لجسم المضخة ومن إغلاقهما بإحكام.
5. إذا كانت حلمة الثدي لا تستقر في منتصف تجويف الفوهة دون فرق، فأنت بحاجة إلى حجم أكبر من مسند الثدي "ComfortFit" المقدم مع العمود.

لا يتم شفط أي لب

إذا شعرتي بتناقض قوة الشفط، يرجى تجربة الخطوات التالية:

1. تأكدتي من تعقيم كل أجزاء المضخة وتركيبها بشكل سليم.
2. فحصي الصمام الأبيض للتأكد من عدم وجود أي تمزق أو ثقوب. جزء الصمام الأبيض في غاية الأهمية للحصول على قوة شفط مناسبة. يرجى تغيير الصمام الأبيض إذا لزم الأمر بالصمام الاحتياطي المقدم مع المضخة.

يرجى التأكد من ملائمة حاجز السيليكون والعمود بإحكام لجسم المضخة ومن إغلاقهما بإحكام.

يرجى التأكد من ملائمة مسند الثدي "ComfortFit" بإحكام لجسم المضخة ومن إغلاقهما بإحكام.

أتم أشكركم على اهتمامكم بهذا المنتج.

1. إذا شعرتي بأنك أثناء شفط اللبن، فجربي الخطوات التالية: رعا تشفطين اللبن بقوة. ليس من الضروري استخدام كل قوة الشفط التي تستطيع المضخة الوصول إليها. جربي الضغط على المقبض لتصف المسافة وتذكرتي الإيقاع المقترح لمدة 2-3 ثانية.
2. رعا تحتاجين لاستخدام مسند أكبر أو أصغر للثدي. لذلك جربي تاريخ سحب لبن وعاء من اللبن واستخدمي الأقدم مع العمود. استشيري طبيبك للتقييم والمعايرة.

9

الرضاعة الطبيعية باستخدام حلمة "NaturalWave"


صممت هذه الحلمة "NaturalWave" خصيصاً لكي:

- تساعدك في الحفاظ على إلماط ثابتة للرضاعة الطبيعية.
- تبديل الرضاعة بين الثدي والزراجة.
- تتسجم مع حركة لسان الطفل الممتحنة كالأواج.
- تحفز على الحس الطبيعي الغريزي للطفل من أجل المساعدة على نومه بسهولة طبيعية.

1. التقاط الثدي
2. حركة اللسان المتوجة
3. البلع

يرتفع الجزء الخلفي من لسان الطفل موجهاً اللبن إلى المريء.

صممت حلمة "NaturalWave" خصيصاً وبشكل مثبت عيادياً للحفاظ على هذا النمط الطبيعي للرضاعة.

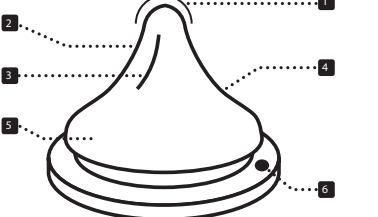

1. طرف الحلمة يتحكم الرضيع في تدفق اللبن.
2. سيليكون ناعم 100% يمتد وينبش من أجل الوصول إلى ضغط مثالي.
3. الحواف الراسية الداخلية تقوي هيكل الحلمة وتجعلها مقاومة للظني
4. تصميم فريد متدرج للاندخات للحفاظ على حركة اللسان الطبيعية
5. قاعدة حلمة واسعة محبة لسهولة الالتقام والشفط الفعال
6. AVIS يقلل مقدار الهواء الذي يسبب الغثض للأطفال الرضع

توفر حلمة بتصميم من قطعة واحدة خال من التعقيد للشفط الطبيي والمعتوسط والسريع.

ينصح باستخدام الرضاعة الطبيعية فقط طوال الشهور الستة الأولى من حياة

3. يرجى التأكد من ملائمة حاجز السيليكون والعمود بإحكام لجسم المضخة ومن إغلاقهما بإحكام.

4. يرجى التأكد من ملائمة مسند الثدي "ComfortFit" بإحكام لجسم المضخة ومن إغلاقهما بإحكام.
5. إذا كانت حلمة الثدي لا تستقر في منتصف تجويف الفوهة دون فرق، فأنت بحاجة إلى حجم أكبر من مسند الثدي "ComfortFit" المقدم مع العمود.

لا يتم شفط أي لب

إذا شعرتي بتناقض قوة الشفط، يرجى تجربة الخطوات التالية:


1. تأكدتي من تعقيم كل أجزاء المضخة وتركيبها بشكل سليم.
2. فحصي الصمام الأبيض للتأكد من عدم وجود أي تمزق أو ثقوب. جزء الصمام الأبيض في غاية الأهمية للحصول على قوة شفط مناسبة. يرجى تغيير الصمام الأبيض إذا لزم الأمر بالصمام الاحتياطي المقدم مع المضخة.

يرجى التأكد من ملائمة حاجز السيليكون والعمود بإحكام لجسم المضخة ومن إغلاقهما بإحكام.

يرجى التأكد من ملائمة مسند الثدي "ComfortFit" بإحكام لجسم المضخة ومن إغلاقهما بإحكام.

أتم أشكركم على اهتمامكم بهذا المنتج.

1. إذا شعرتي بأنك أثناء شفط اللبن، فجربي الخطوات التالية: رعا تشفطين اللبن بقوة. ليس من الضروري استخدام كل قوة الشفط التي تستطيع المضخة الوصول إليها. جربي الضغط على المقبض لتصف المسافة وتذكرتي الإيقاع المقترح لمدة 2-3 ثانية.
2. رعا تحتاجين لاستخدام مسند أكبر أو أصغر للثدي. لذلك جربي تاريخ سحب لبن وعاء من اللبن واستخدمي الأقدم مع العمود. استشيري طبيبك للتقييم والمعايرة.

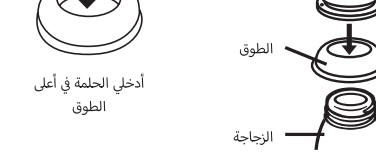

الاحتياطات: بعد الانتهاء من استخدام المنتج، يرجى وضعه في مكان جاف ومغطى. استخدمني هذا المنتج دائماً تحت إشراف شخص بالغ. لا تطغني هذا المنتج أو تخزنيه بالمواد الحامضية أو المواد الكيميائية الصارة أو لتجفيفه بياضها. فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج. لا تتركي المنتج في ضوء الشمس أو الحرارة المباشرة، أو تركيزه في معقم ("محول معقم") أطول من الحد الذي يوصى به. لا تدفني السائل بوضع الكوب مباشرة على شعلات الغاز أو الكهرباء، أو على أواني ندفئة أو في موافد كهربوية وغير ذلك.

لسلامة وصحة طفلك تحذير: استخدمني هذا المنتج دائماً تحت إشراف شخص بالغ. لا تستخدمني حلمات كوسيلة لتسكين الطفل. فحص الوسائل المسموح أو لفترات متعددة يؤدي إلى تسوس الأسنان. دائماً درجة حرارة الرضعة قبل تقديمها للطفل. ابعدتي كل المكونات غير المستخدمة عن متناول الأطفال. لا تتركي طفلك وحده مع معدّات الشرب فقد يتعرض لخطر الاختناق أو خطر السقوط أو احتمال تفكيك المنتج.

تحذير: قد يحدث تسوس الأسنان في الأطفال حتى في حالة استخدام وسائل غير مثالة. فقد يحدث ذلك إذا ترك الطفل يرضع من الزراجة أو الكوب لفترات طويلة على مدار اليوم خاصة أثناء الليل عندما يقل اللعاب أو عندما يستخدم كوسيلة للإسكات. لا تتركي الحلمة في ضوء الشمس أو الحرارة المباشرة، أو تركيزها في معقم ("محول معقم") أطول من الحد الذي يوصى به. فقد يؤدي ذلك إلى ترقيق الحلمة. فحصي الحلمة قبل كل استعمال. تخفي من الحلمة عند أول علامة على تلفها أو ترقيقها. غيри الحلمة كل 7 أسابيع لغرض الصحة والسلامة. اسحبي حلمة الرضاعة في كل الاتجاهات لفحصها.

تنبيه: بعض العناصر المصنعة وبعض المحاليل قد تجعل السيليكون شفافاً ولن يؤدي ذلك إلى تعديل أي من الخصائص. لا تضعي اللبن البشري في الميكرويف لأن الميكرويف يغير تكوين اللبن. فقد يؤدي التسخين في الميكرويف إلى درجات حرارة عالية للغاية. يرجى التحلي بالحرص الشديد عند التسخين في الميكرويف. رجي الرضعة الساخنة برفق لضمان توزيع الحرارة وافحصي درجة الحرارة قبل إرضاع الطفل.

تحذير: مواد التعبئة والتغليف ليست جزءاً من المنتج. من أجل سلامة طفلك، يرجى إزالة مواد التغليف والتعبئة والخلص منها قبل الاستخدام مع قراءة الإرشادات والتعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً. ضعي المنتج مفتوحاً في الميكرويف.

Manufacturer: Lansinoh Laboratories
Saglik Gereciieri Tasarim San.Tic. Ltd.
Sti.A.O.S.B - 10006 Sok. No:64 35620
Cigli/Izmir/Turkiye

صاحب التسجيل والمستورد: النماز للصحة شراكة عامة، موشي أقيف 2، أور يهودا. الشركة المصنعة: مخترعات لانسينو. بلد الصنع: تركيا. خدمة العملاء: *6505 | altman.co.il

يجب الاطلاع بدقة على نشرة المستهلك المرفقة مع العبوة قبل الاستعمال. قم بمراجعة نشرة المستهلك المرفقة بعناية قبل الاستخدام.

رقم الموافقة للأداة الطبية: 15100417 .

Lansinoh®



לנסינוה • לאחסון • להאכיל

הכל בבקבוק אחד! קל, פשוט ונוח



להאכיל



לאחסון



לשאוב

לשאוב - ישירות אל תוך בקבוקי האחסון

משאבות החלב של לנסינו (משאבה חשמלית דו צדדית, חד צדדית ומשאבה ידנית) מגיעות עם בקבוק מיוחד המתאים לשאיבה, לאחסון ולהאכלה של חלב אם.

לאחסון - בקבוקי אחסון בטוחים ונוחים לשימוש גם במקרר או במקפיא

בקבוקי האחסון וההאכלה של לנסינו מיוצרים מפלסטיק מיוחד המתאים לבוא במגע עם חלב אם לאורך זמן. **ללא ביספנול A או ביספנול S** (BPA & BPS Free). מתאימים לניקוי במדיח כלים ולסטריליזציה במיקרוגל או בסטריליזטור.

להאכיל - עם פטמה תומכת הנקה NaturalWave®

פטמת NaturalWave® מתאימה לתינוקות שעדיין יונקים ובמיוחד ל"סרבני בקבוק" בזכות צורת הפטמה המעודדת תנועת לשון גלית וחלקה, בדומה לתהליך היניקה הטבעי. מערכת ה-AVS מפחיתה כניסת אוויר המהווה גורם פוסנציאלי לקוליק וגזים.

Manufacturer: Lansinoh Laboratories
Saglik Gereciieri Tasarim San.Tic. Ltd.
Sti.A.O.S.B - 10006 Sok. No:64 35620
Cigli/Izmir/Turkiye

صاحب التسجيل والمستورد: النماز للصحة شراكة عامة، موشي أقيف 2، أور يهودا. الشركة المصنعة: مخترعات لانسينو. بلد الصنع: تركيا. خدمة العملاء: *6505 | altman.co.il

يجب الاطلاع بدقة على نشرة المستهلك المرفقة مع العبوة قبل الاستعمال. قم بمراجعة نشرة المستهلك المرفقة بعناية قبل الاستخدام.

رقم الموافقة للأداة الطبية: 15100417 .